



Blood Sampling Kit

輸送採血セット

Y O B O U K A I

採血の流れ

Blood Sampling Kit

採血キットの内容物を 確認しましょう

キット袋
(チャック付き)



説明書



※返信用で使いますので
捨てないでください。

採血器具



採血用ろ紙



消毒綿



絆創膏

(ばんそうこう)



P O I N T

採血しやすいように
血行を良くしましょう!

採血量が少ないと
検査できない場合があります。

**必ず手を温めてから
採血を行ってください**



石鹸とお湯で手を温めながら
良く洗いましょう。




温かいお湯の中でマッサージ
すると採血しやすくなります。

1 採血用ろ紙の準備




採血用ろ紙

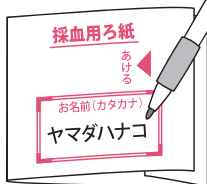


採血用ろ紙に必ずカタカナでお名前をご記入してください

※匿名でも受付が可能です。

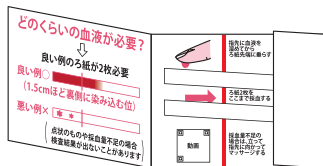

採血用ろ紙を開き、必要採血量などの注意事項を確認してください。

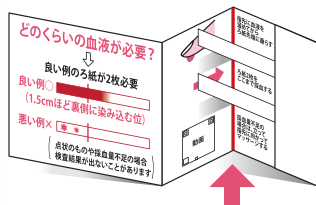

必要採血量の赤い線で折り曲げてから採血してください。


2 採血の準備



消毒綿



採血する指先でやわらかい部分を探しましょう。
(かたい部分からでは必要な量が取れないことがあります。)

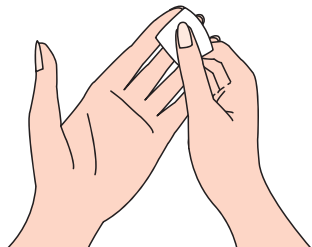

採血する指全体を、同封されている消毒綿で拭き、30秒程度乾燥させてください。

※消毒した指は採血が終了するまでさわらないようにしてください。

採血器具




この採血器具は1回用の使い捨て器具です(くり返し使えません)


※予備のために採血器具がもう一つ同封されています。

A: キャップをはずしてください


※白いボタンをつまみ
キャップをクルクルとまわしてから
引きぬいてください

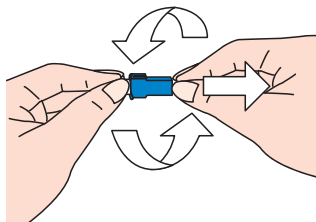

B: 指は必ずテーブルなどに置いて固定してください

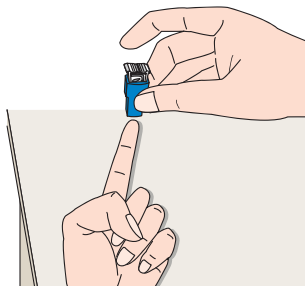

C: 採血器具を指先に押し付ける

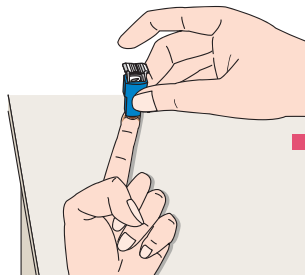


指の腹に採血器具の先端部分を
しっかりとあててください。

D: 採血器具の白いボタンを押す

パチンと音がすると、針が一瞬だけ出ます。

※1回きりの操作です

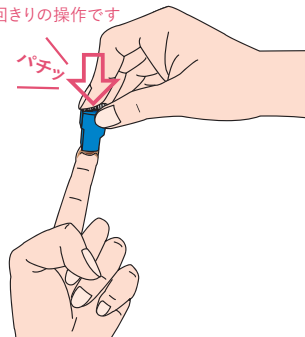

※一度使用すると、二度と針は使用できませんのでご注意ください


採血用ろ紙に血液をつける



採血用ろ紙

採血後は裏面をご確認をお願いいたします。


指先に血をためる

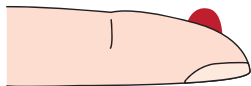

できるだけ多くの量をためてください。

※指先にためる量が少ないうちに採血用ろ紙にしみこませると、血がすぐに止まってしまう。


採血用ろ紙につける

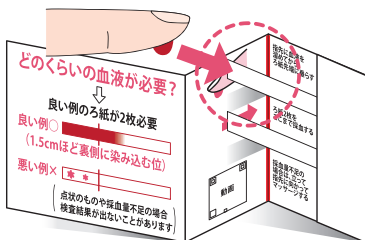

採血用ろ紙に赤い線まで血液がしみこむまで採血をくり返してください。


POINT

血液量が足りない場合には血液を出しやすいマッサージ

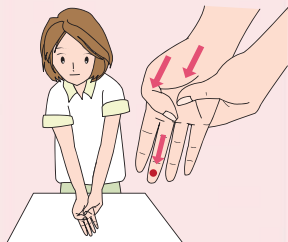

立ち上がり、腕を心臓より下げ手のひらから指先に向かってマッサージしてください。
(採血した指先には触れないでください。)

2枚のろ紙に採血してください

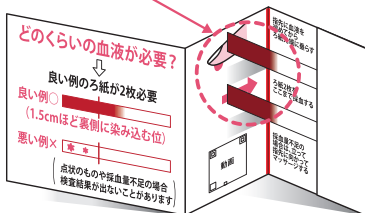

どのくらいの血液が必要?



良い例のろ紙が2枚必要です。

良い例○ (1.5cmほど裏側に染み込む位)


悪い例× (点状のものや採血量不足の場合 検査結果が出ないことがあります)

5 採血後の処理



絆創膏

止血をする

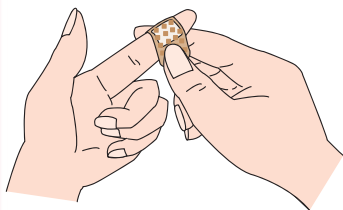

採血後の指は、止血してから絆創膏を貼ってください。



6 採血用ろ紙を乾燥させる



採血用ろ紙

採血用ろ紙を 1時間乾燥させた後

元の状態に戻してください。

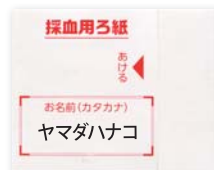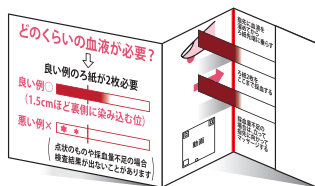

採血用ろ紙の乾燥について
衛生上の問題や二次感染の可能性を
考慮し、ろ紙の乾燥をお願いしています。

※ドライヤーの使用など、熱を加えての乾燥は
行わないでください。


7 検査物を返送する



キット袋



採血器具2個

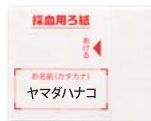

採血用ろ紙

**使い終わった器具は
「キット袋」に入れてください**

※袋に入れた状態で、返送してください。



**検査物を採血キットの袋に入れ
返信用封筒でご返送ください**

使用後の採血器具は、未使用のものを含めて採血用ろ紙と一緒に返送してください。
使用・未使用にかかわらず回収し、弊社にて医療廃棄物として処分します。
使用済の絆創膏や消毒綿は、ご自宅のゴミ箱に破棄できます。

使用上のご注意

- 以下に該当する場合はこの採血器具を使用しないでください。
 - ・出血性の疾患などで止血機能が低下している方
 - ・薬剤を服用中で止血機能が低下している方
 - ・ショックアレルギーのある方や、出血した場合に血の止まりにくい方
- 採血器具は、採血目的以外には使用しないでください。(指先から採血用の器具です)
- 傷のある部分には使用しないでください。
- 使用期限を過ぎた採血器具は使用しないでください。
- 採血器具に破損や汚染、キャップが外れているなどの異常が認められる場合は使用しないでください。
- 採血器具に過剰な力を加えないでください。破損のおそれがあります。
- キャップが外れにくい場合は、無理に使用しないでください。
- キャップを外した後は誤作動を防ぐため、すぐに使用してください。
- 採血器具は1回用の使い捨て器具です。繰り返しでの使用はできません。
- 使用後はキャップをしない(キャップを本体に戻さない)でください。
- 採血後は、止血用に絆創膏(ばんそうこう)を貼ってください。
- 採血の傷口が治りにくいときは、医師にご相談ください。
- 採血器具はお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 検査物の採取は自己責任において実施してください。説明書に記載の方法以外で採血された場合は検査結果データの保証はいたしかねます。

予防会

 **0120-940-827**

月曜日～土曜日 9:00～17:00

(日曜・祝日・年末年始は除く)

URL <https://www.yoboukai.co.jp>